
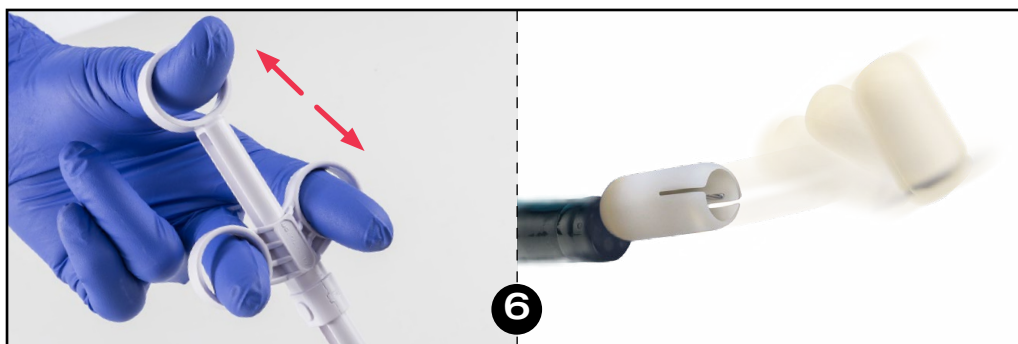
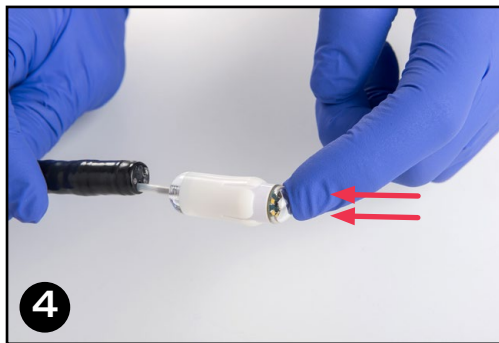


BX00711144

Advantage® - capsule endoscope delivery device

Advantage® - Système de largage de la capsule endoscopique
 Advantage® - Endoskopische Videokapsel-Absetzvorrichtung
 Advantage® - dispositivo di posizionamento per capsula endoscopica
 Advantage® - dispositivo para la colocación endoscópica de cápsulas
 Advantage® - dispositivo de colocação de cápsula endoscópica

Advantage® - kapsel til indføring ved endoskopi
 Advantage® - inbrenginstrument voor capsule-endoscoop
 Advantage® - kapsül endoskop yerle tirme cihazı
 Advantage® - 캡슐 장경 방출 장치

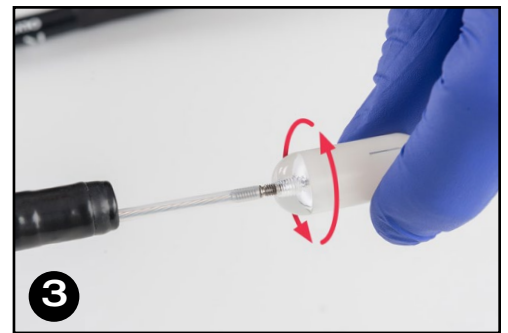

- **Refer to the Instructions for Use** for complete instructions and safety information.
- This device was designed to be used in conjunction with compatible video capsules – refer to the Instructions for Use.
- Advantage® is indicated for the endoscopic delivery of video capsules to the stomach or duodenum.



Se référer au mode d'emploi pour connaître les instructions et les consignes de sécurité complètes.
Die vollständigen Anweisungen und Sicherheitsinformationen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanleitung.
Consultare le istruzioni per l'uso per le istruzioni complete e le informazioni sulla sicurezza.
Consulte las instrucciones de uso si desea obtener instrucciones completas e información de seguridad.
Consultar as Instruções de Utilização para obter instruções completas e informações de segurança.
Se brugsanvisningen for fyldestgørende anvisninger og sikkerhedsinformation.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor volledige instructies en veiligheidsinformatie.
Eksiksiz talimatlar ve güvenlik bilgileri için Kullanım Talimatlarına bakın.
자세한 지침 및 안전 정보는 사용 설명서를 참조하십시오.

Ce système a été conçu pour être utilisé en association avec des vidéocapsules compatibles ; se référer au mode d'emploi.
Dieses Produkt ist für die gemeinsame Verwendung mit kompatiblen Videokapseln bestimmt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanleitung.
Questo dispositivo è stato progettato per essere utilizzato assieme a capsule video compatibili – consultare le istruzioni per l'uso.
Este dispositivo está diseñado para utilizarse junto con cápsulas de vídeo compatibles; consulte las instrucciones de uso.
Este dispositivo foi concebido para ser utilizado em conjunto com cápsulas de vídeo compatíveis – consultar as Instruções de Utilização.
Denne anordning er beregnet til brug sammen med kompatible videokapsler – se brugsanvisningen.
Dit instrument is ontworpen voor gebruik met de compatibele videocapsules. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing.
Bu cihaz, uyumlu video kapsülleri ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Kullanım Talimatlarına bakın.
이 장치는 호환 가능한 비디오 캡슐과 함께 사용하도록 설계되어 있습니다. 사용 설명서를 참조하십시오.

Advantage[®] est indiqué pour l'introduction endoscopique de vidéocapsules dans l'estomac ou le duodénum.
Advantage[®] ist für die endoskopische Einbringung von Videokapseln in den Magen oder Zwölffingerdarm vorgesehen.
Advantage[®] è indicato per il posizionamento endoscopico di capsule video nello stomaco o nel duodeno.
Advantage[®] está indicado para la colocación endoscópica de cápsulas de vídeo en el estómago o el duodeno.
O Advantage[®] está indicado para a colocação endoscópica de cápsulas de vídeo no estômago e duodeno.
Advantage[®] er indiceret til endoskopisk indføring af videokapsler i mave eller duodenum.
Advantage[®] is bestemd voor het endoscopisch inbrengen van videocapsules in de maag of het duodenum.
Advantage[®], video kapsüllerin mideye veya duodenuma endoskopik iletimi için endikedir.
Advantage[®]는 위장 또는 십이지장에 비디오 캡슐 내시경을 전달하기 위해 사용됩니다.

US Endoscopy is a subsidiary of STERIS Corporation.
©2017 US Endoscopy. All rights reserved.

Listening...and delivering solutions®, the US Endoscopy listening...and delivering solutions design, and all marks denoted with ® or ™ are registered with the U.S. Patent and Trademark Office, or trademarks owned by US Endoscopy.

Listening...and delivering solutions®, le logo US Endoscopy listening...and delivering solutions, ainsi que toutes les marques portant le signe ® ou ™ sont déposées auprès de l'U.S. Patent and Trademark Office ou sont des marques commerciales détenues par US Endoscopy.

Listening...and delivering solutions®, das US Endoscopy listening...and delivering solutions®-Design und alle mit ® oder ™ bezeichneten Marken sind eingetragene Marken, die beim U.S. Patent and Trademark Office (US-Patent- und Markenamt) registriert wurden, oder Marken, die sich im Besitz von US Endoscopy befinden.

Listening...and delivering solutions®, US Endoscopy listening...and delivering solutions design e tutti i marchi contrassegnati da ® o ™ sono stati registrati presso l'Ufficio brevetti e marchi registrati degli Stati Uniti o sono marchi di fabbrica di proprietà di US Endoscopy.

Listening...and delivering solutions®, el diseño de US Endoscopy listening...and delivering solutions, y todas las marcas que lleven ® o ™ están registradas.

en la oficina estadounidense de patentes y marcas comerciales, o son marcas comerciales y propiedad de US Endoscopy.

Listening...and delivering solutions®, o design US Endoscopy listening...and delivering solutions e todas as marcas assinaladas com ® ou ™ estão registadas no Departamento de Registos de Patentes dos EUA (U.S. Patent and Trademark Office) ou são marcas comerciais detidas pela US Endoscopy.

Listening...and delivering solutions®, US Endoscopy listening...and delivering solutions design and alle varemærker markeret med ® eller ™ er registreret i U.S. Patent and Trademark Office eller er varemærker, der tilhører US Endoscopy.

Listening...and delivering solutions®, het ontwerp "listening...and delivering solutions" van US Endoscopy en alle aanduidingen met ® of ™ zijn gedeponereerd bij het Patent and Trademark Office in de Verenigde Staten of zijn handelsmerken van US Endoscopy.

Listening...and delivering solutions®, US Endoscopy listening...and delivering solutions tasarımı ve ® veya ™ ile belirtilen tüm markalar, ABD Patent ve Ticari Marka Ofisine kayıtlıdır veya US Endoscopy'nin ticari markalarıdır.

Listening...and delivering solutions®, US Endoscopy listening...and delivering solutions 디자인, 그리고®또는™으로 표시된 모든 상표는 미국 특허청(U.S. Patent and Trademark Office)에 등록되어 있거나 US Endoscopy가 소유하고 있는 상표입니다



listening...and delivering solutions[®]